

dynion explore.

Instrucciones breves


ottobock.



Observe las instrucciones de uso.
647G1868=all_INT

Optimización durante la prueba dinámica

- Retire la cubierta delantera para ajustar la articulación de rodilla protésica.
- Respete el orden al adaptar y ajustar la articulación de rodilla protésica.

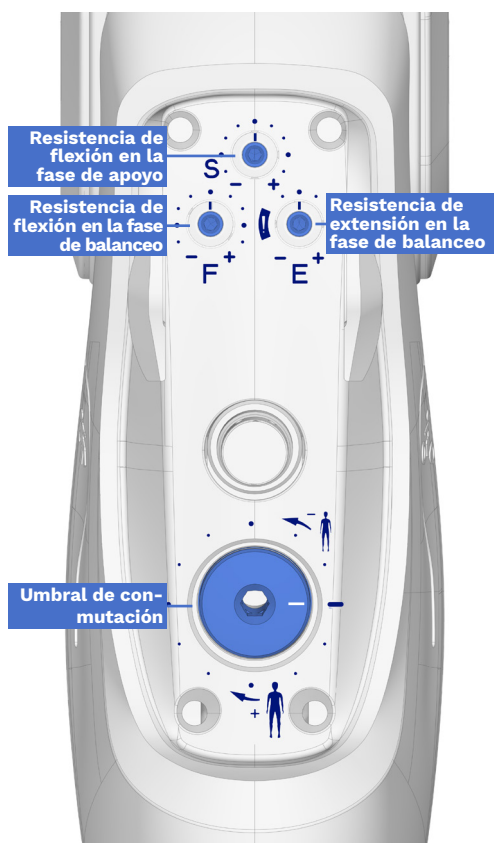

La figura muestra los ajustes de fábrica.

1 Sentarse

Ajuste la **resistencia de flexión en la fase de apoyo (S)** para que el usuario pueda sentarse con seguridad y sin resistencia excesiva.

2 Caminar

Permita al usuario que camine con seguridad.

1. Al principio, ajuste el **umbral de conmutación** a un nivel en el que no se active ninguna fase de balanceo (puede que sea necesario realizar varias vueltas).
2. Inicie el ejercicio y baje gradualmente el **umbral de conmutación** hasta que la fase de balanceo se active de forma fiable (máx. 30° por paso).
 - Compruebe el patrón de marcha después de cada modificación.
3. Ajuste la **resistencia de flexión en la fase de balanceo (F)** de modo que la pierna no oscile en exceso hacia atrás y que el apoyo del talón esté totalmente extendido.
4. Ajuste la **resistencia de extensión en la fase de balanceo (E)** de modo que no se alcance el tope con demasiada fuerza y que se alcance a tiempo la extensión completa para apoyar el talón.
 - Compruebe el umbral de conmutación después de cada modificación.

3 Caminar por rampas y escaleras

1. Ajuste la **resistencia de flexión en la fase de apoyo (S)** para obtener un apoyo seguro sin resistencia excesiva.
2. Compruebe la **resistencia de extensión en la fase de balanceo (E)** para que se alcance la extensión completa al apoyar el talón.

4 Sentarse

Vuelva a comprobar la **resistencia de flexión en la fase de apoyo (S)** para sentarse y adapte la con los ajustes para bajar rampas y escaleras.

5 Caminar

1. Compruebe el umbral de conmutación al caminar sobre una superficie plana, ya que el tope puede establecerse especialmente en los primeros 10 minutos.
2. Pruebe diferentes velocidades de marcha y longitudes de zancada, incluso pasos cortos y rápidos.

YouTube Training Videos



◀ **Dynion and dynion explore**
Adjustments and settings

Quickstart Guide

Different languages ▶




◀ **Dynion and dynion explore**
User training

Pasos para el uso en el agua



Pasos después del contacto con el agua

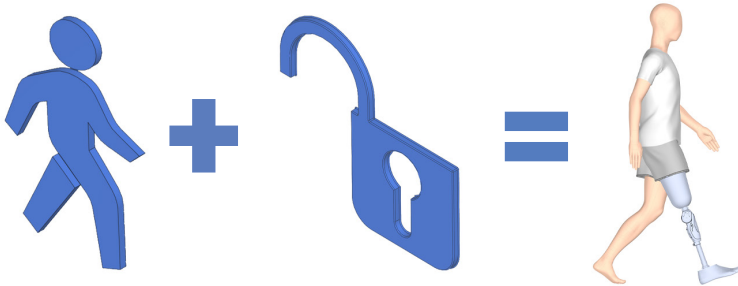

Posibilidad de compensación flexible de la longitud del adaptador tubular

