




Osservare le istruzioni per l'uso
647G1868=all_INT

Ottimizzazione durante la prova dinamica

- ▶ Rimuovere la copertura anteriore per regolare l'articolazione di ginocchio protesica.
- ▶ Rispettare l'ordine di adattamento e regolazione dell'articolazione di ginocchio protesica.

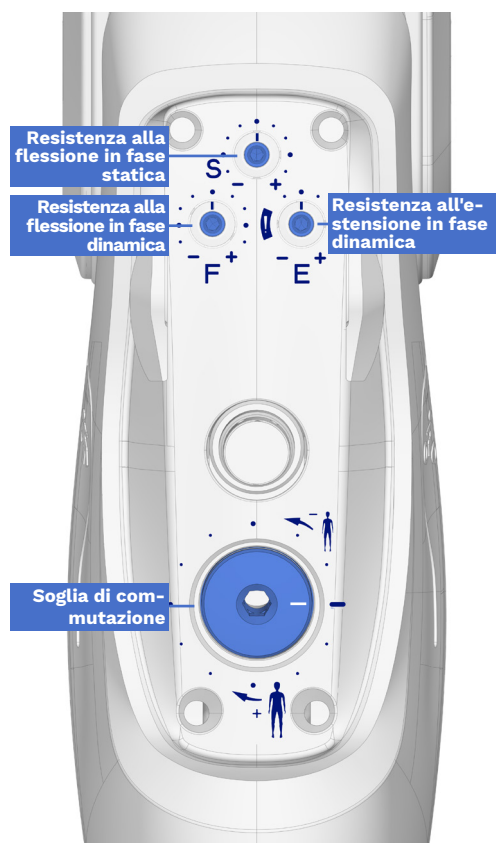

La figura mostra le impostazioni di fabbrica

1 Sedersi

Regolare la **resistenza alla flessione in fase statica (S)** in modo che l'utilizzatore possa sedersi in sicurezza e senza eccessiva resistenza.

2 Camminare

Far camminare l'utilizzatore solo in sicurezza!

1. Inizialmente, impostare la **soglia di commutazione** in modo tale che non si inneschi una fase dinamica (potrebbero essere necessari più giri).
2. Iniziare l'esercizio e abbassare gradualmente la **soglia di commutazione** fino a quando la fase dinamica si innesca in modo affidabile (massimo 30° per passo).
▶ Controllare l'andatura dopo ogni modifica.
3. Regolare la **resistenza alla flessione in fase dinamica (F)** in modo che la parte inferiore della gamba non oscilli troppo all'indietro e sia completamente distesa al momento dell'appoggio del tallone.
4. Regolare la **resistenza all'estensione in fase dinamica (E)** in modo da non provocare un arresto brusco e raggiungere in tempo la massima estensione al momento dell'appoggio del tallone.
▶ Controllare la soglia di commutazione dopo ogni modifica.

3 Camminare su rampe e scale

1. Regola la **resistenza alla flessione in fase statica (S)** per un supporto sicuro senza resistenza eccessiva.
2. Controllare la **resistenza all'estensione in fase dinamica (E)** per raggiungere la massima estensione al momento dell'appoggio del tallone.

4 Sedersi

Ricontrollare la **resistenza alla flessione in fase statica (S)** prima di sedersi e regolarla in base alle impostazioni per la discesa da rampe e scale.

5 Camminare

1. Controllare la soglia di commutazione quando si cammina su una superficie piana, in quanto il tampone può bloccarsi soprattutto nei primi 10 minuti.
2. Testare diverse velocità di deambulazione e lunghezze del passo, anche passi brevi e rapidi.

YouTube Training Videos



◀ **Dynion and dynion explore**
Adjustments and settings

Quickstart Guide

Different languages ▶




◀ **Dynion and dynion explore**
User training

Passi per l'utilizzo in acqua



Passi successivi al contatto con l'acqua

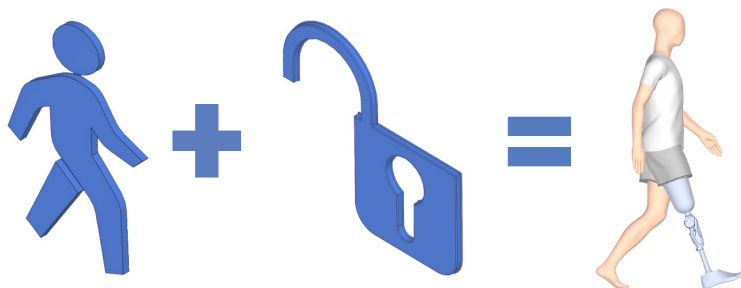

È possibile compensare in modo flessibile la lunghezza del tubo modulare

