

dynion explore.


简要说明



请参阅使用说明书。
647G1868=all_INT

在动态试戴过程中优化

- ▶ 调节假肢膝关节时将前部盖板取下。
- ▶ 遵循调整和调节假肢膝关节时的顺序。

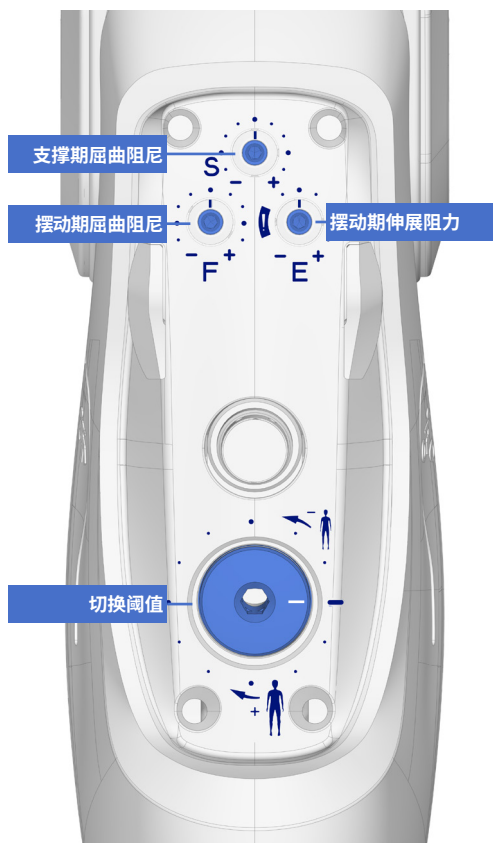

图示为出厂设置

1 入座

调整**支撑期屈曲阻尼 (S)**，以使用户坐下时安全且阻力不会过大。

2 行走

只允许在安全可靠的情况下让用户行走！

1. 开始时，将**切换阈值**调至较高水平，使摆动期无法激活（必要时可以旋转数圈）。
2. 行走练习开始时，逐渐降低**切换阈值**，直至摆动期能够稳定激活（每步最大 30°）。
▶ 每次更改后检查步态！
3. 调节**摆动期屈曲阻尼 (F)**，使小腿部分不会向后摆动过大，并在足跟着地时完全伸展。
4. 调节**摆动期伸展阻力 (E)**，使其不会发生硬性碰撞，并能及时在足跟着地时达到完全伸展状态。
▶ 每次更改后检查切换阈值！

3. 在斜坡或楼梯上行走

1. 调整**支撑期屈曲阻尼 (S)**，提供安全支撑，且不产生过大阻力。
2. 检查**摆动期伸展阻力 (E)**，以便在足跟着地时达到完全伸展状态。

4 入座

重新检查入座的**支撑期屈曲阻尼 (S)**，并将其与斜坡与下楼的调整相匹配。

5 行走

1. 在平坦地面上行走时检查切换阈值，因为缓冲器在最初 10 分钟内尤其可能发生沉降。
2. 测试不同的步速和步幅，也包括短而快的步伐。

YouTube Training Videos



◀ **Dynion and dynion explore**
Adjustments and settings

Quickstart Guide

Different languages ▶




◀ **Dynion and dynion explore**
User training

水中使用时的步骤



同水接触后的步骤

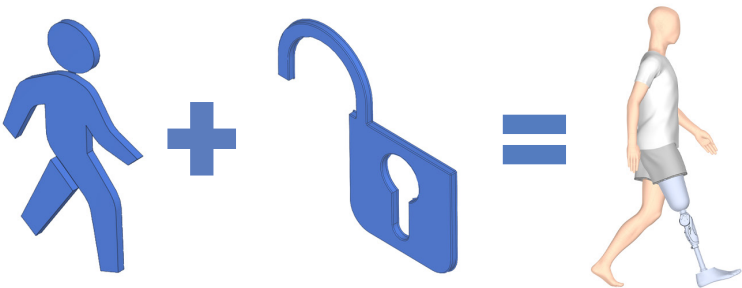

管道适配器可实现弹性长度补偿

