



وضع سوار الفخذ L300 Go لبدء التشغيل

- 1 بلل الأقطاب القماشية للأرداف ثم ضعها على سوار الفخذ L300 Go.
- 2 للاستعمال على عضلات الأرداف أثناء الجلوس، ضع سوار الفخذ L300 Go على بُعد ثلاث أصابع من الركبة.
- 3 تأكد من وضع سوار الفخذ L300 Go في المكان المناسب والذي يحدده المعالج. أنظر الشكل 3.
- 4 للاستعمال على أوتار الركبة، أثناء الجلوس أو الوقوف قم بوضع سوار الفخذ L300 Go على بُعد أربع أصابع على الأقل فوق مؤخرة الركبة مباشرة تحت الردف. أنظر الشكل 4.

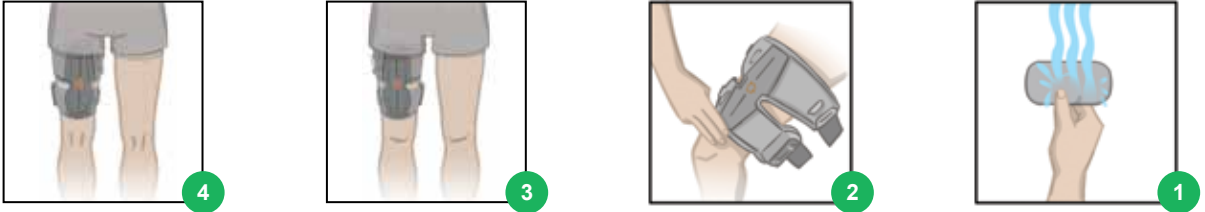



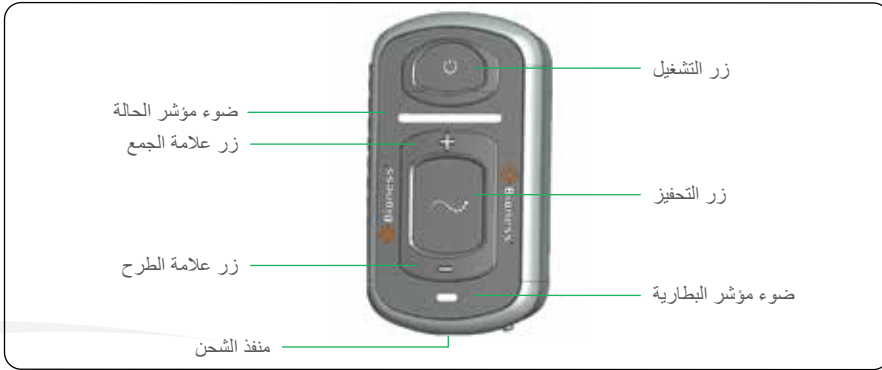

تشغيل نظام L300 Go



- 1 اضغط على زر تشغيل/إيقاف التشغيل لتشغيل مولد النبض الخارجي.
- 2 حدد إما وضع المشي وإما وضع التدريب:
• لتحديد وضع المشي، اضغط على زر الوضع لفترة قصيرة.
• لتحديد وضع التدريب، اضغط بشكل مستمر على زر الوضع لمدة 3 ثوان.
سيخزن EPG الوضع الجديد مع ردود الفعل الصوتية واللمسية. للخروج من وضع التدريب، اضغط بشكل مستمر على زر الوضع لمدة 3 ثوان.
- 3 إذا لزم الأمر، فاضبط مستوى الكثافة التحفيز بالضغط على زر علامة الجمع أو زر علامة الطرح .

قم بتوصيل جهاز شحن النظام بـ EPG، ثم قم بتوصيله بمقيس الحائط.

بطارية EPG ضعيفة	يومض شريط مؤشر حالة EPG بضوء أحمر مع ضوء مؤشر البطارية الذي يومض بضوء أصفر	 (وميض)
البطارية مُنخفضة	يومض باللون الأصفر	 (وميض)
الشحن	يومض باللون الأخضر	 (وميض)
اكتمل الشحن	أخضر ثابت	



مؤشرات مولد النبض الخارجي

النظام قيد التشغيل	يومض باللون الأخضر	 (وميض)
التحفيز في وضع إيقاف التشغيل	يومض باللون الأخضر	 (وميض)
التحفيز في وضع التشغيل	يومض باللون الأصفر	 (وميض)
خطأ نشط	وميض أحمر بتنبية مسموع	 (وميض)
خلل في عمل EPG	أحمر ثابت	








شاشات وحدة التحكم*

النظام قيد التشغيل	متصل	
النظام في وضع المشي/التدريب، التحفيز ممكن لكن متوقف	موجات التحفيز مرئية	
النظام في وضع المشي/التدريب، التحفيز جاهز وقيد التشغيل	موجات التحفيز تومض	
مستوى الكثافة	مؤشرات 0-9	
تم تفعيل وضع المشي	مؤشر أيقونة المشي	
تم تفعيل وضع التدريب	مؤشر أيقونة التدريب	
الصوت قيد التشغيل	مؤشر أيقونة الصوت	



*مكون اختياري

مؤشرات خطأ النظام

خطأ بالوصلة الكهربائية. تأكد من توصيل الأقطاب الكهربائية ووضع EPG بالكامل على الحامل. امسح تنبيه الخطأ بالضغط على  أو  في مولد النبض الخارجي.	
مؤشر انخفاض طاقة البطارية على EPG. شحن النظام.	
خلل في عمل EPG. اضغط بشكل متصل لمدة 30 ثانية على زر  ثم قم بالتشغيل أو اتصل بالدعم الفني.	