


Banda del muslo Plus/independiente

Tarjeta de referencia del usuario

L300 Go 





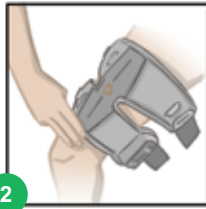

Colocación de la banda de muslo del L300 Go

- 1 Humedezca y sujete los Electroodos Thigh Cloth a la banda del muslo del L300 Go.
- 2 Para su colocación en los cuádriceps mientras está sentado, coloque la banda del muslo del L300 Go en su muslo, situando el localizador a tres dedos de la rodilla.
- 3 Asegúrese de colocar la banda del muslo del L300 Go en la posición de ajuste determinada por el especialista. Consulte la ilustración 3.
- 4 Para su colocación sobre los femorales mientras está sentado o de pie, coloque la banda del muslo del L300 Go al menos a cuatro dedos por encima de la parte posterior de la rodilla, justo debajo del pliegue del glúteo.
Consulte la ilustración 4.



Funcionamiento del sistema L300 Go



- 1 Presione el botón de encendido/apagado  para encender el EPG.
- 2 Seleccione el modo de marcha o el de entrenamiento:
 - Para seleccionar el modo de marcha, pulse el botón de modo  brevemente.
 - Para seleccionar el modo de entrenamiento, mantenga *pulsado* el botón de modo  durante tres segundos. La EPG reconocerá el nuevo modo con avisos sonoros y táctiles. Para salir del modo de entrenamiento, mantenga pulsado el botón de modo  durante tres segundos.
- 3 Si es necesario, ajuste el nivel de intensidad de la estimulación pulsando los botones más  o menos .

Para obtener una lista completa de todas las contraindicaciones, advertencias, reacciones adversas, precauciones e instrucciones de cuidado, consulte la Guía del usuario.

 **bioness**[®]
A Bioventus Rehab Company

Cómo cargar las baterías

Conecte juego de cargador del sistema al EPG y, a continuación, enchúfelo en una toma de corriente.



	La barra indicadora del estado del EPG aparece en rojo intermitente, junto con la luz indicadora de batería en amarillo intermitente	La batería del EPG está baja
	Amarillo intermitente	La batería está baja
	Verde intermitente	Se está cargando
	Verde fijo	La carga se ha completado

Indicadores del EPG



	Verde intermitente	El sistema está encendido
	Verde intermitente	La estimulación está apagada
	Amarillo intermitente	La estimulación está encendida
	Rojo intermitente con alarma sonora	Error activo
	Rojo fijo	Error de funcionamiento del EPG

Señales de la unidad de control*



	Cuadro compacto	El sistema está encendido
	Onda de estimulación visible	El sistema está en marcha/entrenamiento, la estimulación está habilitada, pero apagada
	Onda de estimulación intermitente	El sistema está en marcha/entrenamiento, la estimulación está habilitada y encendida
	Número de 0 a 9 mostrado	Nivel de intensidad
	Icono de marcha mostrado	El modo de marcha está activado
	Icono de entrenamiento mostrado	El modo de entrenamiento está activado
	Icono de audio mostrado	El sonido está activado

* Componente opcional

Señales de error del sistema

	Contacto de electrodo defectuoso. Asegúrese de que los electrodos estén encajados y el EPG completamente dentro del estuche. Borre la alerta de error presionando o en el EPG.
	Indicador de batería baja en el EPG. Cargue el sistema.
	Error de funcionamiento del EPG. Mantenga presionado el botón durante 30 segundos y, a continuación, encienda el dispositivo. Si sigue fallando, llame al servicio técnico.

