


Cosciale Plus/Sistema autonomo

Scheda di riferimento per l'utilizzatore

L300 **Go**





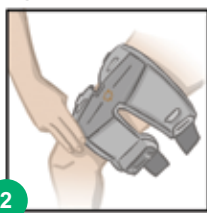

Come indossare il cosciale L300 Go

- 1 Bagnare e collegare gli elettrodi in tessuto per coscia al cosciale L300 Go.
- 2 Per il posizionamento sul quadricipite da seduti, posizionare il cosciale L300 Go sulla coscia, collocando il localizzatore a tre dita di distanza dal ginocchio.
- 3 Assicurarsi di posizionare il cosciale L300 Go nella posizione indicata dal medico. Vedi Figura 3
- 4 Per il posizionamento sul tendine posteriore del ginocchio, da seduti o in piedi, posizionare il cosciale L300 Go ad almeno quattro dita di distanza dal ginocchio, sulla parte posteriore, appena sotto la piega del gluteo. Vedi Figura 4.



Funzionamento del sistema L300 Go



- 1 Premere il pulsante di accensione/spegnimento  per accendere l'EPG.
- 2 Selezionare la modalità deambulazione o riabilitazione:
 - Per selezionare la modalità deambulazione, premere brevemente il pulsante  della modalità.
 - Per selezionare la modalità riabilitazione, premere e tenere premuto il pulsante  della modalità per 3 secondi. L'EPG confermerà la nuova modalità con una segnalazione acustica/tattile. Per uscire dalla modalità riabilitazione, tenere premuto il pulsante  della modalità per 3 secondi.
- 3 Se necessario, regolare il livello di intensità della stimolazione premendo il pulsante  più o il pulsante  meno.

Per l'elenco completo di tutte le controindicazioni, avvertenze, reazioni avverse, precauzioni e istruzioni per la cura, vedere la Guida per l'utilizzatore.





L300 Go®, Bioness, il logo Bioness® e LiveOn® sono marchi commerciali di Bioness Inc. negli Stati Uniti d'America o in altri Paesi. | www.bioness.com

 **bioness**[®]
A Bioventus Rehab Company

Carica delle batterie






Collegare il set caricabatteria all'EPG e inserire la spina nella presa a parete.



 (lampeggiante)	La barra dell'indicatore di stato dell'EPG è rosso lampeggiante mentre l'indicatore luminoso della batteria è giallo lampeggiante	Batteria dell'EPG scarica
 (lampeggiante)	Giallo lampeggiante	Batteria scarica
 (lampeggiante)	Verde lampeggiante	In carica
	Verde fisso	Carica completa





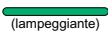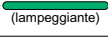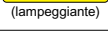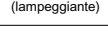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


Segnalazioni dell'EPG



 (lampeggiante)	Verde lampeggiante	Il sistema è acceso
 (lampeggiante)	Verde lampeggiante	La stimolazione non è attiva
 (lampeggiante)	Giallo lampeggiante	La stimolazione è attiva
 (lampeggiante)	Rosso lampeggiante con allarme sonoro	Errore attivo
	Rosso fisso	Malfunzionamento dell'EPG







Indicazioni dell'unità di controllo*



	Fisso	Il sistema è acceso
	Onda stimolazione visibile	Il sistema è in Deambulazione/Riabilitazione, la stimolazione è abilitata ma non è attiva
	Onda di stimolazione lampeggiante	Il sistema è in Deambulazione/Riabilitazione, la stimolazione è abilitata ed è attiva
	Numeri 0–9	Livello d'intensità
	Visualizza icona di deambulazione	La modalità deambulazione è abilitata
	Visualizza icona di riabilitazione	La modalità riabilitazione è abilitata
	Visualizza icona dell'audio	L'audio è attivo

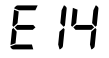*Componente opzionale

Indicazioni degli errori di sistema

 (lampeggiante)	Contatto elettrodo difettoso. Assicurarsi che gli elettrodi siano agganciati e che l'EPG sia completamente nella base. Cancellare l'avviso dell'errore premendo  o  sull'EPG.	
 (lampeggiante)	Indicatore batteria scarica sull'EPG. Caricare il sistema.	 Malfunzionamento dell'EPG. Premere e tenere premuto il pulsante  per 30 secondi, poi accendere o contattare l'assistenza tecnica.

