


Thigh Plus/Stand-Alone

Naslagkaart voor de gebruiker

L300 Go 





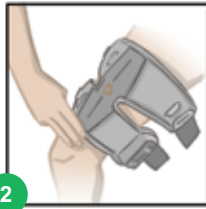

De L300 Go-dijmanchet omdoen

- 1 Maak de dij-elektroden nat en bevestig ze aan de L300 Go-dijmanchet.
- 2 Voor plaatsing op de quadriceps terwijl u zit, plaatst u de L300 Go-dijmanchet op uw dij, waarbij u de locator op een afstand van drie vingerbreedten van uw knie plaatst.
- 3 Zorg dat u de L300 Go-dijmanchet plaatst op de plek die is bepaald door de specialist. Zie afbeelding 3.
- 4 Voor plaatsing op de hamstrings terwijl u zit of staat, plaats de L300 Go-dijmanchet ten minste vier vingerbreedten boven de achterkant van de knie, onder de gluteale plooi. Zie afbeelding 4.



Het L300 Go-systeem bedienen



- 1 Druk op de aan/uit-knop  om de EPG in te schakelen.
- 2 Selecteer de loop- of trainingsmodus:
 - Om de loopmodus te selecteren, drukt u *kortstondig* op de modusknop .
 - Om de trainingsmodus te selecteren, houdt u de modusknop  3 seconden *ingedrukt*. De EPG bevestigt de nieuwe modus met audio- en vibratiefeedback. U verlaat de trainingsmodus door de modusknop  3 seconden ingedrukt te houden.
- 3 Stel zo nodig het intensiteitsniveau van de stimulatie af door op de plusknop  of minknop  te drukken.

Voor een volledige lijst van alle contra-indicaties, bijwerkingen, voorzorgsmaatregelen en zorginstructies raadpleegt u de gebruikershandleiding.

L300 Go®, Bioness, het Bioness Logo® en LiveOn® zijn handelsmerken van Bioness Inc. in de Verenigde Staten of andere landen. | www.bioness.com

De batterijen opladen

Sluit de systeemopladerset aan op de EPG en op een stopcontact.



	De EPG-statusindicatorbalk knippert geel en de batterij-indicatorlamp knippert geel	EPG-batterij bijna leeg
	Knippert geel	Batterij bijna leeg
	Knippert groen	Opladen
	Brandt groen	Volledig opgeladen

EPG-lampje



	Knippert groen	Systeem is aan
	Knippert groen	Stimulatie is uit
	Knippert geel	Stimulatie staat aan
	Knippert rood met hoorbaar alarm	Actieve fout
	Brandt rood	EPG werkt niet

Bedieningsunitweergaven*



*Optioneel onderdeel

	Constant	Systeem is aan
	Stimulatiegolf zichtbaar	Systeem is in loop/training, stimulatie is ingeschakeld maar uit
	Stimulatiegolf knippert	Systeem is in loop/training, stimulatie is ingeschakeld en aan
	Geeft 0-9 weer	Intensiteitsniveau
	Geeft looppictogram weer	Loopmodus is ingeschakeld
	Geeft trainingspictogram weer	Trainingmodus is ingeschakeld
	Geeft audiopictogram weer	Audio staat aan

Systemfoutweergaven

	Gebrekkig elektrodecontact. Zorg dat de elektroden goed vastzitten, EPG volledig in houder. Wis foutmelding door op of op EPG te drukken.	
	Indicator voor lage batterij op EPG. Laad het systeem op.	
		EPG werkt niet. Houd de knop 30 seconden ingedrukt, moet dan inschakelen of bel Technische ondersteuning.