


# Thigh Plus/Stand-Alone

## Kullanıcının Referans Kartı


L300 Go 





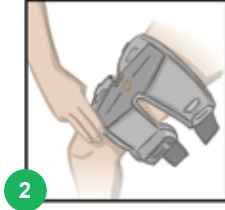

### L300 Go Uyluk Manşetinin Takılması

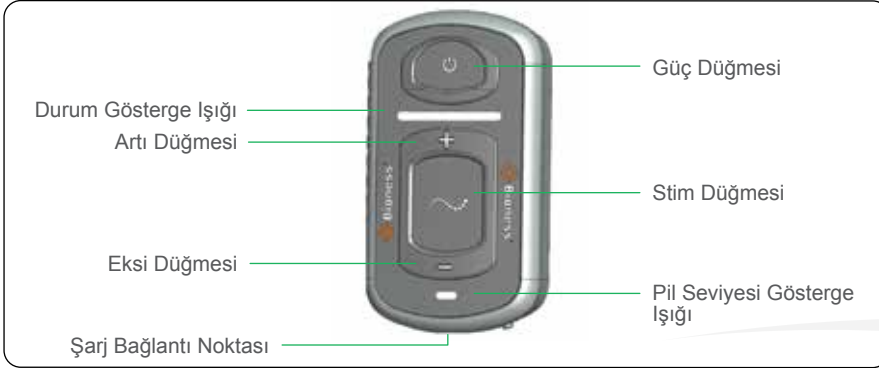- 1 Uyluk Kumaş Elektrotlarını ıslatın ve L300 Go Uyluk Manşetine takın.
- 2 Oturur durumda kuadrisepse yerleştirmek için yer bulucuyu dizinizden üç parmak uzağa konumlandırarak L300 Go Uyluk Manşetini uyluğunuzun üzerine yerleştirin.
- 3 L300 Go Uyluk Manşetini, klinisyeniniz tarafından belirlenen uygun takma konumuna yerleştirdiğinizden emin olun. Bkz. Şekil 3.
- 4 Oturur durumda veya ayaktayken hamstring'lerin üzerine yerleştirmek için L300 Go Uyluk Manşetini diz arkasından en az dört parmak yukarıya, kalça bölgesinin tam altına yerleştirin. Bkz. Şekil 4.



### L300 Go Sistemini Çalıştırma



- 1 EPG'yi açmak için  açma/kapama düğmesine basın.
- 2 Yürüyüş veya egzersiz modunu seçin:
  - Yürüyüş modunu seçmek için  mod düğmesine *kısa süreyle* basın.
  - Egzersiz modunu seçmek için  mod düğmesini 3 saniye *basılı tutun*. EPG, sesli ve dokunsal geri bildirimle yeni modu onaylar. Egzersiz modundan çıkmak için  mod düğmesini 3 saniye basılı tutun.
- 3 Gerekirse, stimülasyon yoğunluğu seviyesini  artı veya  eksi düğmesine basarak ayarlayın.

Tüm kontrendikasyonlar, uyarılar, advers reaksiyonlar, önlemler ve bakım talimatlarının tam listesi için, lütfen Kullanıcı Kılavuzunu inceleyin.

L300 Go®, Bioness, Bioness Logo® ve LiveOn®, Amerika Birleşik Devletleri veya diğer ülkelerde Bioness Inc. firmasının kayıtlı ticari markalarıdır. | [www.bioness.com](http://www.bioness.com)

## Pillerin Şarj Edilmesi

Sistem şarj etme setini EPG'ye bağlayın ve ardından bir duvar prizine takın.



	Pil Seviyesi Gösterge Işığı Sarı Yanıp Sönerken EPG Durum Gösterge Çubuğu Kırmızı Yanıp Sönüyor	EPG Pil Seviyesi Düşük
	Sarı Yanıp Sönüyor	Pil Seviyesi Düşük
	Yeşil Yanıp Sönüyor	Şarj Etme
	Sabit Yeşil Yanıyor	Şarj Tam Dolu

## EPG Göstergeleri



	Yeşil Yanıp Sönüyor	Sistem Açık
	Yeşil Yanıp Sönüyor	Stimülasyon Kapalı
	Sarı Yanıp Sönüyor	Stimülasyon Açık
	Sesli Alarmla Birlikte Kırmızı Yanıp Sönüyor	Aktif Hata
	Sabit Kırmızı Yanıyor	EPG Arızası

## Kumanda Birimi Göstergeleri\*



\*İsteğe Bağlı Bileşen

	Sabit Yanıyor	Sistem Açık
	Stim Dalgası Görünür	Sistem Yürüyüş/Egzersiz modunda, Stimülasyon etkinleştirilmiş ama Kapalı
	Stim Dalgası Yanıp Sönüyor	Sistem Yürüyüş/Egzersiz modunda, Stimülasyon etkinleştirilmiş ve Açık
	0-9 Görüntüleniyor	Yoğunluk Seviyesi
	Yürüyüş Simgesi Görüntüleniyor	Yürüyüş Modu Etkinleştirilmiş
	Egzersiz Simgesi Görüntüleniyor	Egzersiz Modu Etkinleştirilmiş
	Ses Simgesi Görüntüleniyor	Ses Açık

## Sistem Hata Göstergeleri

	Arızalı Elektrot Temas Noktası. Elektrotların takılı olduğundan ve EPG'nin yuvaya tamamen oturduğundan emin olun. EPG'de <b>+</b> veya <b>-</b> düğmesine basarak hata uyarısını silin.	
	EPG'de Düşük Pil Seviyesi Göstergesi. Sistemi şarj edin.	
		EPG Arızası.  düğmesini 30 saniye basılı tutun, ardından sistemi açın veya Teknik Destek birimini arayın.