

S-FIT-00-043 Transformation Buckle

Gebruiksaanwijzing | Mode d'emploi

Nederlands

1. Neem het abductiekussen en de bijhorende band.
2. Maak de band los en verwijder hem van het kussen.
3. Steek het uiteinde van de band door de lus aan de achterkant van de brace.
4. Bevestig de klittenband.
5. Neem nu de buckle erbij die dient voor de ombouwing van de brace.
6. Maak de van klittenband voorziene buckle vast aan de zijkant van de brace zoals te zien op afbeelding 6.
7. Klik de buckle vast aan de schouderband.

Français

1. Prenez le coussin d'abduction et la sangle attachée.
2. Détachez la sangle et enlevez-la du coussin.
3. Passez l'extrémité de la sangle par le passant qui se trouve à l'arrière de l'orthèse.
4. Fixez la sangle à velcro.
5. Prenez ensuite la boucle qui sert à la transformation de l'orthèse.
6. Fixez la boucle avec le velcro sur la coté de l'orthèse comme indiqué sur image 6.
7. Fixez la boucle sur la sangle d'épaule.

