

Kinetec Spectra Quick Reference Guide

TAAK	ACTIE	OPMERKING
VERGRENDELEN / ONTGRENDELEN HANDBEDIENING	Druk gelijktijdig op  en 	Handbediening wordt ontgrendeld bij aan- / en uitschakelen
MANUAL SET UP MODE	Schakel het toestel aan Druk op  op de handbediening. Wijzig extensiebereik, druk op  Druk op  of  om het extensiebereik te verhogen of te verlagen. Wijzig flexiebereik, druk op  Druk op  of  om flexiebereik te verhogen of te verlagen. Om de snelheid aan te passen, druk op  Druk op  of  : versnelt of vertraagt. Om de kracht in te stellen, druk op  Druk op  of  : kracht neemt toe of af. Om de tijd aan te passen, druk op  Druk op  of  : tijd vermeerdert of vermindert.	De extensiewaarde knippert. (Druk op  of  binnen de 3 seconden.) De flexiewaarde knippert. (Druk op  of  binnen de 3 seconden.) De weerde knippert om nieuwe aanpassingen door te voeren, wacht 3 seconden.
TIJDKLOK 	Druk op de tijd klok  zodat u de sessietijd te zien krijgt.	Bij aan- en uitschakelen valt de tijd terug op 0.
WARM - UP 	Druk op STOP  Druk op de WARM-UP toets  DRUK START 	De Spectra start de beweging op 70% van het maxima hoekbereik en verhoogt met 5% bij elke volledige cyclus omdat de maximale amplitude is bereikt.



MODULATIE MODUS 	Druk op STOP  Druk op MODULATIE  Druk  in tot de gewenste flexie is bereikt. Sla dan op door onmiddellijk op  te drukken. OF Druk  in tot de gewenste extensie is bereikt. Sla dan op door onmiddellijk op  te drukken. Druk op  om te beginnen met de nieuwe instellingen.	Wordt gebruikt om de door de patiënt verdraagbare pijngrenzen vast te leggen.
BY-PASS MODUS 	Toestel moet in beweging zijn, dan  indrukken. Druk op BY-PASS.  Vervolgens op  duwen. De ingestelde waarde op flexie wordt dan overschreden. Sla op door onmiddellijk  in te drukken. OF Vervolgens op  duwen. De ingestelde waarde op extensie wordt dan overschreden. Sla op door onmiddellijk  te drukken.	Om de vastgestelde pijngrenzen te overschrijden tijdens de oefening.
PROGRAMMA'S	Schakel het toestel uit. Druk  en  gelijktijdig in terwijl het toestel terug aanschakelt. Het woord PROGRAMMA verschijnt op de handbediening. Laat  en  los van zodra Dit woord verschijnt. Selecteer 1 van de 16 programma's d.m.v.  of  drukken. SELECEER MODUS WARM UP - Druk 1 maal op . Manual set up: Druk 2 maal op . Stel flexie/extensie, snelheid, kracht en pauze in. Druk op  Programma bewaren:  induwen. Programma verwijderen:  induwen. Schakel eerst het toestel uit en dan weer aan om toegang te krijgen tot de bewaarde programma's	