

3663555002102

Compeed Huuliherpeslaastari 15kpl

HUULIHERPESLAASTARI / MUNSÅRSPLÅSTER

INGREDIENTS: PU (Polyurethane) Siliconized PE/PET film Hydrocolloid adhesive.

FI

Pese kätesi ennen käyttöä ja käytön jälkeen. Varmista, että ihosi on puhdas ja kuiva. Älä laita huulille voidetta, sillä laastari ei silloin tartu. Revi yksi tuote irti tuoteliuskasta rei'itettyä reunaa pitkin. Vältä painamasta vihreää muovisuojusta, jotta laastari irtaana suojasta myöhemmin. Ota yhdellä kädellä kiinni asettimen kirkkaasta kaarevasta reunasta ja erota vihreä suojamuovi toisella kädellä – vetäen niitä pois päin toisistaan. Vihreän suojan voi nyt heittää pois. Näet pyöreän huuliherpeslaastarin kirkkaan asettimen yläosassa. Liimapinta on nyt ylöspäin. Älä koske liimapintaan vaan aseta laastari asettimen avulla liimapinta alaspäin herpesrakkulan päälle ja paina se tiiviisti paikalleen. Irrota asetin varovasti, jolloin huuliherpeslaastari jää paikalleen huuleen. Laastarin päälle voidaan levittää meikkiä tai huulipunaa.

SE

Tvätta händerna före och efter användning. Säkerställ att huden är ren och torr. Använd inte plåstret i kombination med kräm då detta medför att plåstret inte fäster på munsåret och kan påverka behandlingen negativt. Använd båda händerna och dra försiktigt av den genomskinliga pappersapplikatorn från det skyddande gröna omslaget. Du kommer se det runda munsårs-plåstret på den övre delen av applikatorn. Var noga med att inte röra vid plåstrets häftsida. Använd en spegel och applicera den här delen av applikatorn på munsåret. Tryck försiktigt fast plåstret på munsåret. Dra varsamt applikatorn nedåt och tryck sedan fast resten av plåstret. Smink eller läppstift kan appliceras över plåstret.

Perrigo Suomi Oy

Lars Sonckin kaari 10

02600 Espoo