

MONIPUOLINEN VALIKOIMA ENSIAPUTARVIKKEITA

Kätevät verkko- ja vetoketjutaskut

Sisältö:

Cool-X pikakylmäpussi
Kolmioliina
Ensiapuside
Idealside
Itseensäkiinnittyvä tukiside
Laastarilajitelma 20 kpl
Kangaslaastari 6 x 20 cm
Kiinnittyvä haavaside 2 kpl
Rakkolaastari 2 kpl
Haavatyyny 2 kpl
Haavataitos 4 kpl
Sideharso 2 kpl
Antiseptinen pyyhe 4 kpl
Teippi
Vinyylikäsiineet
Sakset
Pinsetit, punkkipihdit
Hakaneulat 6 kpl
Lämpöpeite

Innehåll:

Cool-X snabbkyl påse
Mitella
Förstahjälpen-förband
Idealbinda
Självhäftande bandage
Plåsterset 20 st
Tygplåster 6 x 20 cm
Självhäftande sårförband 2 st
Blåsplåster 2 st
Sårdyna 2 st
Sårkompress 4 st
Gasbinda 2 st
Antiseptisk duk 4 st
Tejp
Vinylhanskar
Sax
Pincett, tick pincett
Säkerhetsnål 6 st
Värmetäcke

HAAVAN HOITO

Nosta vuotava raaja ylös ja tyrehdytä verenvuoto painamalla. Puhdista haava juoksevan veden alla tai antiseptisellä pyyhkeellä. Poista lika taitoksella. Sulje haava.

Pienet haavat: Laastari/kiinnittyvä haavaside, hiertymiin rakkolaastari.

Vuotavat haavat: Ensiapuside tai haavatyyny/sidetaitoksia haavan päälle ja kiinnitys sideharsolla ja kuitukangasteipillä.

Runsaasti vuotavat haavat: (paineside) Haavatyyny/sidetaitoksia, sideharsorulla ja kiinnitys toisella sideharsorullalla tai ensiapusiteellä.

Jos haava on syvä ja verenvuoto jatkuu käänny lääkärin puoleen.

Toimenpidepakkauksen kokoaja
BIODEM MEDICAL
www.cool-x.fi
Kaipionmäentie 7
37570 LEMPÄÄLÄ, FINLAND



Yleinen hätänumero

112