



VAROITUS / WARNING

FI

Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Sisältää piparminttuöljyä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. JOS TUOTETTA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: hakeudu lääkäriin. Säilytä lasten ja muiden, jotka voivat vahingossa niellä tabletin tai liuoksen, ulottumattomissa. JOS TUOTETTA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Jos ilmenee ärsytystä: Lopeta käyttö ja hakeudu lääkäriin.

Älä laita tablettia tai liuosta suuhun. Älä käytä, jos olet yliherkkä jollekin ainesosalle. Älä juo puhdistusliuosta tai käytä sitä suuvenenä. Älä kosketa suuta tai silmiä, kun olet käsitellyt tablettia tai liuosta.

Käyttöohjeet:

1. Pudota yksi COREGA-tabletti riittävään määrään erittäin lämmintä (ei kuumaa) vettä niin, että hammasproteesi peittyy.
2. Liota 3 minuuttia ja harjaa proteesi pehmeällä harjalla liuoksen kanssa.
3. Huuhtelee proteesi huolellisesti juoksevan veden alla. Hävitä liuos heti käytön jälkeen.

SE

Orsakar allvarlig ögonirritation. Innehåller pepparmyntolja. Kan orsaka en allergisk reaktion. Tvätta händerna grundligt efter användning. VOD KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Tau r eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Förvaras oåtkomligt för barn och andra som kan råka svälja tabletten eller lösningen. VID FÖRTÄRING: Kontakta giftinformationscentralen eller läkare. Vid irritation: Sluta använda och sök läkarhjälp.

Tabletter eller lösning får inte hamna i munnen. Använd inte om du är känslig mot någon av ingredienserna. Drink inte rengöringslösningen och använd den inte som munskölj. Rör inte vid munnen eller ögonen efter hantering av tabletter eller lösning.

Bruksanvisning:

1. Släpp ner en COREGA-tablett i tillräckligt mycket varmt (ej hett) vatten så att det täcker tandprotesen.
2. Efter 3 minuters blötläggning ska du borsta tandprotesen med lösningen med en mjuk bsrste.
3. Skölj protesen noggrant under rinnande vatten. Släng omedelbart rester av lösningen efter användning.

INGREDIENTS: DOSIUM BICARBONATE, CITRIC ACID, POTASSIUM CAROATE (POTASSIUM MONOPERSULFATE), SODIUM CARBONATE, SODIUM CARBONATE PEROXIDE, TAED, SODIUM BENZOATE, PEG-180, SODIUM LAURYL SULFATE, VP/VA COPOLYMER, AROMA, CELLULOSE GUM, CI 42090, CI 73015, CI 19140.

Stafford-Miller (Ireland) Limited, Clocherane,
Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford, Ireland.
FI: PL/PB 24, 02231 Espoo/Esbo