



DYREBANDASJEIDÉER

Forklaring:
Tallene 1-4 indikerer hvilket bandasje-
produkt som brukes i illustrasjonene.

- 1 THIN FOAM BANDAGE 3 ADHESIVE FOAM BANDAGE
2 THICK FOAM BANDAGE 4 FLEX WRAP BANDAGE



Vær forsiktig!
Ikke stram for mye, slik
at blodsirkulasjonen
blir innsnevret.

BANDASJE AV ØRET 2 3

1. Form en lengde av Thick Foam Bandage til en kjegle (for å gå inn i øret). Dette er for å beskytte meatus.

2. Brett et annet stykke for å lage en trekant og plasser det bak øret på det tiltenkte såret eller for å støtte øret under bandasjeringen.

3. Kutt Thick Foam Bandage til en 4,5 cm stripe og pakk rundt.

4. Bandasjer øret med Thick Foam Bandage. Hold det på plass med en bredere Adhesive Foam Bandage som fester seg på hud og pels. La det være en åpning for øregangen og la det friske øret være fritt for bandasje.

POTEBANDASJERING 1 2 4

1. Plasser en lengde med bandasje mellom tærne og tredeputen. Lag en åpning i bandasjen og plasser den rundt sidekloen.

2. Riv av en remse med bandasje i passe lengde. Lag åpninger til tærne.

3. Tre tærne gjennom åpningene og brett bandasjen som vist.

5. Avslutt med Flex Wrap Bandage for å sikre bandasjen.

POTEBANDASJERING

1. Fest én lengde med Thick eller Thin Foam Bandage rundt beinet.

2. Riv av en passende lengde som passer mellom tærne. Fest den til bandasjen rundt beinet og, snu den 180 grader.

3. Tre den smale delen inn mellom tærne og fest på andre siden. Gjenta for hver av tærne.

4. Avslutt ved å feste en bandasje nummer to rundt beinet for å sikre bandasjen.

BEHANDLING AV MUGG

Én runde med Thick Foam Bandage er tilstrekkelig for behandling av mugg.

HOVLEDD

Ved bandasjering av et hovledd, plasseres det første Adhesive Foam Bandage rundt kronranden og nedover. Det andre Thick Foam Bandage plasseres over injeksjonsområdet og må også lindes nedover hoven.

ETTER LEDDINJEKSJON

Etter leddinjeksjoner bør håndteres av veterinærer.

Vendaseideer
Den tykke skumvendasetten plasseres direkte på injeksjonsområdet. Det er viktig å utnytte elastisiteten i vendeasjen for å forhindre at den glir.

ETTER KNELLEDDSJINJEKSJON

Begynn med å pakke Adhesive Foam Bandage under kneet. Deretter pakk Thick Foam Bandage over injeksjonspunktet og overlapp det med Adhesive Foam Bandage. På denne måten vil Thick Foam Bandage ikke gli nedover. For ekstra sikring, fest Thick Foam Bandage med et annet lag av Adhesive Foam Bandage over kneet og overlapp det med Thick Foam Bandage.

BANDASJERING AV SÅR

1. Sørg for at såret er rent og pelsen/benet er tørt.

2. Begynn med å pakke en runde med Adhesive Foam Bandage under det sårede området.

3. Deretter pakker du Thin eller Thick Foam Bandage rundt såret i en spiralform. Overlapp den første bandasjen med 2-3 cm. Hvis nødvendig, påfør en kompress på såret for ekstra absorpsjon.

4. Bytt ut den andre bandasjen når det er nødvendig. Den første bandasjen fjernes når helingen er fullført.

5. Avslutt med Flex Wrap Bandage for fiksering

BANDASJERING AV SÅR

Sørg for at såret er rent og at pelsen er tørr.

2. Fest Adhesive Foam Bandage direkte på området som trenger beskyttelse, men IKKE direkte på såret.

3. Fest kompressen med Adhesive Foam Bandage.

ANNET BRUKSOMRÅDE

Legg merke til hvordan elastisiteten blir utnyttet når hamstringen blir festet.

OMRÅDE UTEN SÅR

Fest Adhesive Foam Bandage direkte på området uten sår.

VEND ETT SPENE

Bruk Thin Foam Bandage ved skade på jur eller fiksering av spenepopper.

FJERNING - ADHESIVE FOAM BANDAGE

Bruk Snøgg Removal Wipes eller hudvennlig olje for å lette fjerning av klebemiddelet.