

WiBUplus Schnelldesinfektion Lemon

Alkoholische Schnelldesinfektion

- VAH-gelistet
- Wirkungsbereich A
- gebrauchsfertig
- aldehydfrei
- für unzugängliche Flächen
- mit Lemonduft



Eigenschaften

Alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel. Gebrauchsfertig. Zur Desinfektion von alkoholbeständigen Flächen aller Art. Frei von Aldehyden. Besonders für schwer zugängliche Flächen und alle Bereiche, wo eine schnelle Wirksamkeit erforderlich ist.

Anwendung

Die zu desinfizierenden Flächen oder Gegenstände mit ausreichender Menge der gebrauchsfertigen Lösung vollständig benetzen und nach der Einwirkzeit ggf. mit einem Einmaltuch nachwischen.

Gem. Biozidprodukte-Verordnung:

Zur aldehydfreien Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Flächen und medizinischen Inventar.

Hinweis: Nicht auf alkoholempfindlichen Oberflächen wie Chrom- und Acryloberflächen anwenden. Vor der Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

Einwirkzeiten

Bakterizid inkl. MRSA, levurozid gem. DGHM/VAH-Richtlinien (gelistet in der 5-Minuten-Spalte)	konz. 2 Min.
Tuberkulozid (M. terrae)	konz. 2 Min.
HBV, HIV, HCV, BVDV, Vakzinia (begrenzt viruzid) gem. RKI/DVV	konz. 1 Min.

Inhaltsstoffe

Wirksamer Bestandteil in 100 g Lösung:
36,6 g Ethanol,
0,06 g Didecyldimethylammoniumchlorid

Chemisch-physikalische Daten

Aussehen des Konzentrates: klare, farblose Lösung
pH-Wert: 7,0 +/- 1,0
Flammpunkt: 25°C
Geruch: Lemonduft

Lieferformen / Artikelnummer

750 ml Flasche	800921
2,5 Liter Griffflasche	807253
5 Liter Kanister	800931

Gutachten

Die unabhängigen Gutachten zur desinfizierenden Wirkung der WiBUplus Desinfektionsprodukte stellen wir auf Wunsch gern zur Verfügung.

E-Mail: Hygienehelden@wibu-gruppe.de
Telefon: 04102 / 483 - 270.

Warnhinweise

Gefahr



Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Dampf nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Die Angaben zu unseren Produkten entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Produktinformationsblatts und dienen in Anbetracht wechselnder Verhältnisse nur als Anhalt. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Hersteller / Verarbeiter unserer Produkte selbst.

Stand 04 / 2020