

# PODOFIX BØYLEN



**Generelt :** Bøylene er laget av en polimer gel som limes på neglen før den innebygget metalltråden roteres/strammes til ønsket spennkraft.

Podofix bøylene kan brukes ved de fleste tilfeller av inngrodde, nedgrodde og innrullede negler.

| Størrelser | Lengde | Artikkelnummer |
|------------|--------|----------------|
| Mini       | 12 mm  | 221035         |
| Small      | 16 mm  | 221032         |
| Medium     | 19 mm  | 221033         |
| Large      | 22 mm  | 221034         |

**Virketiden er fra 2 uker til 2 måneder.**

Bøylene skal plasseres over problemstedet eller litt nedenfor mot negleroten.

Bredden på bøylene bør dekke så mye av neglen som mulig, men ikke så bred at den irriterer neglevollen. Start med den mest nedgrodde siden av neglen først.

## Fremgangsmåte:

- Ikke sett foten i fotbad eller anvend sprayfunksjonen på slipemaskinen før på setting av Podofix bøylene.
- Slip neglens overflate med et diamantbor eller en slipesten.
- Finn den rette størrelsen på bøylene.
- Tørk neglen og bøylens underside med alkohol tupferen og la det tørke i minst 30 sekunder.
- Bøy lett til bøylene med fingrene slik at den former seg etter neglen.
- Påfør riktig mengde lim ved å stryke på et tynt lag på undersiden av bøylene. (ikke bruk for mye)
- Hold i viren og plasser bøylene på neglen.
- Press med pekefingerne på kantene av bøylene, og hold i minimum 15 sek. (bruk hansker)
- Vent i minst 2 minutter til limet har tørket.
- Fest spennverktøyet (221036) i bøylens løkke og roter slik at metalltråden vries minst 1 gang eller max. 2 ganger helt rundt.
- Legg avbiteren flatt ned mot bøylene og kutt metalltråden. (hold i tråden mens du klipper)

- Slip lett over den avklippede metalltråden med en neglefil.
- Forsegl den avklippede tråden med Pedi gel (221040)
- Bruk UV lampen til å herde geleen. UV lampen holdes så nært som mulig med max avstand på 5 mm. Lys i 20 sekunder.
- Tørk over bøylen og neglen tilslutt med alkohol tupferen.
- For å fjerne bøylen splittes forsiktig bøylen fra neglen med en spiss negletang.
- Ikke påfør olje eller krem på neglen etter at det er satt på podofix bøylen da kan den løsne.

**Lim med kost : (221038)**

oppbevares i romtemperatur. Etterbruk tørk av flaskeåpningen med et papir. Etter at limet er åpnet er det holdbart i 3 måneder.

**UV micro lampe. (221041)**

varer til ca. 50 herdinger.

**Pedigelt sett. (221039)**

Inneholder pedigel, UV micro lampe og spatel.

**Spatel. (221042)**

Til påføring av Pedigel

**Podofix bøylesett komplett. (221050)**

Inneholder : Podofix bøyer 4 x small, 8 x medium og 4 x large.  
Avbiter tang, UV micro lampe, strammeinstrument, spatel, lim, pedigel og alkohol tupfere.