



HFL Medical Reconstruction Gel

Problemløser for negl.



Det du trenger for å komme i gang:

- Wiping Solution (avfetning) FI 247
- Medical Reconstructing Gel FI 235
- Sculpture Gel pensel (rengjøres kun med avfetningen) FI 248
- Stål spatel 221042
- Spartørk FG 111
- Diamantsliper FC 343
- LED/UV lampe FI 243
- Neglbørste FI 406
- Diabetisk Hjørnetang FI 244
- Antibac 750 ml 7930002
- Hansker Nitril

Fjerning av syk negl:

- Bruker slipemaskin (tørr) med diamantsliper
- Fjern så mye som mulig uten at det blir vondt for klienten
- Bruk evt. Hjørnetang for å fjerne deler
- Fjern støv med en børste
- Rens med Wiping Solution med en Spartørk (spartørk loer ikke)
- Neglen er klar til å behandles med Medical Reconstruction Gel



HUSK at den også kan brukes på soppnegler 😊

Brukerveiledning:

1. Slip neglen matt, evt fjern syke/løse deler. Anbefaler diamant bor FC 343
2. Børst bort løse deler og støv
3. Rens med Wiping Solution på en Spartørk. Husk å ikke ta på negleplaten nå.
4. Påfør Medical Reconstruction Gel med runde bevegelser med penselen. 1 mm fra neglebånd.
5. Når Gelen er fordelt på neglen/e ha så foten i LED/UV lampen i 2 minutt.
6. Fjern så det klissete laget med Wiping Solution på spartørk
7. Slip over og lag neglen naturlig og fin
8. Ønskes Fransk Pedikyr kan dette gjøres før steg 7.

VIKTIG: Bruk avfettingsmiddel før du sliper over negl!
Gå ut fra «Brukerveiledning» og «Fjerning av syk negl» når du skal løse ulike problemer.

TUNELLNEGL:

1. Frigjør neglen fra negl falsen med evt Hjørnetangen.
2. Erstatt stykket som er fjernet med Medical Reconstruction Gel. Herd 2 min.
3. Legg så på et lag på hele neglen! Herd i 2 min.
4. Dette gir et negleløft.
5. Dette er en smertefri behandling.
6. Korreksjonen skjer ved neglens vekst.

TRAUMANEGL:

1. Fjern evt hard, tykk hud som hindrer neglen å vokse frem.
2. Legg på et lag Medical Reconstruction Gel på tåens topp. Herd 2 min for så å legge et lag Gel på hele neglen. Herd 2 min.
3. Gelen trykker den forhøyede huden ned og gir plass slik at neglen vokser over.

NEDGRODD NEGL:

1. Fjern den nedgrodde delen av neglen. Her kan Hjørnetang FI 244 brukes.
2. Erstatt denne delen med Medical Reconstruction Gel. Herd i 2 minutter.
3. Gelen trekker neglen opp og leder den riktig når den vokser ut.

FRAVÆR AV NEGL:

1. Puss ned gjenværende negl og avfett.
2. Fordel Gel og jobb oi sirkelbevegelser slik at du kommer godt til hele negl platen.
3. Herd så i 2 minutter
4. Avfett og slip om nødvendig.

Fransk pedicure:

1. Matt neglen ned, hvis ikke M.R.G alt er lagt
2. Rens negl med børste og Wiping Solution på Spartørk
3. Legg på Basic Gel/CND Base coat
4. Herding i Led/UV lampe 2 min
5. Legg på Rose Gel/CND Romantique
6. Herding med Led/UV lampe i 2 min
7. Legg på den hvite kanten med Wit Gel/CND Cream puff med De Lux Pencil FI 250.
8. Herding i Led/UV lampe i 2 min
9. Legg så på Top Gel/CND Top Coat. Herding 2 min i lampen

Tips: Om du er redd for at den hvite skal flyte ut, herd 1 og 1 negl i Led/UV lampen

Tips: De Lux Penselen må IKKE renses, men bare tørkes av med en tørr Spartørk. Legg den i beskyttelsesrør etter bruk.

HUSK AT ØVELSE GJØR MESTER!!
Dette systemet er et flott hjelpemiddel for
deg og dine klienter 😊
Du kan få de som aldri går uten sokker og
sko til å skinne 😊

Web butikk: biovital.no
Mail: ellen@biovital.no
Facebook: [Thorsen Biovital](#)

LYKKE TIL!

