

# In wenigen Schritten zum Testergebnis

So einfach geht's

Zusätzliche Anleitungen zum Inhalt dieser  
Packung finden Sie unter  
[www.zavamed.com/de/probenpaket-info](http://www.zavamed.com/de/probenpaket-info)

## Kontaktinformationen

+49 (0)40 874069-56  
[kontakt@zavamed.com](mailto:kontakt@zavamed.com)

ZAVA Deutschland GmbH  
Hegestraße 40  
D-20251 Hamburg

## Urinprobe

- Probe zu Hause entnehmen
- Test online aktivieren
- Probe verschicken
- Laborergebnisse erhalten




## Wichtige Informationen

**Bitte beachten Sie: Damit Ihre Probe direkt untersucht werden kann, entnehmen und verschicken Sie diese bitte zwischen Montag und Donnerstag (nicht an Feiertagen).**

**Um genaue Ergebnisse zu erhalten, sollten Sie die Urinprobe gleich nach dem Schlafen sammeln, zum Beispiel am Morgen.**

1

Drücken Sie die Seiten des flach verpackten Sammelbechers zusammen, bis der Boden einrastet.

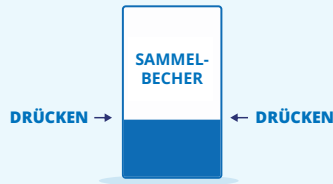

2

Füllen Sie den Sammelbecher mit dem **ersten Morgenurin**.

3


Entfernen Sie die obere Kappe des Urinröhrchens und bringen Sie die verlängerte Spitze an.



4

Tauchen Sie die verlängerte Spitze in den Sammelbecher und ziehen Sie den Kolben, bis das Urinröhrchen bis zur Grundlinie gefüllt ist.

Entsorgen Sie den Urin in der Toilette und den Sammelbecher im Restmüll.

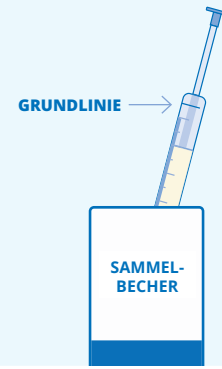

5

Halten Sie das Urinröhrchen senkrecht mit der Spitze nach oben und entfernen Sie die verlängerte Spitze.



6

Setzen Sie die Kappe wieder auf das Urinröhrchen und brechen Sie den Kolben ab.



7

## Wichtig! Aktivieren Sie jetzt Ihren Test

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone oder Tablet und folgen Sie online den vorgegebenen Schritten, um die Aktivierung Ihres Tests abzuschließen.

Alternativ können Sie die folgende Adresse mit Ihrem Webbrowser öffnen:

[www.zavamed.com/de/probe-aktivieren](http://www.zavamed.com/de/probe-aktivieren)



8

Legen Sie das Urinröhrchen in den durchsichtigen Schutzbeutel, entfernen Sie dann den weißen Streifen des Beutels und verschließen Sie ihn.



9

Legen Sie den Schutzbeutel in den voradressierten Rücksendekarton und verschließen Sie auch ihn vollständig.

10

Werfen Sie den Rücksendekarton **noch am selben Tag** in den Briefkasten.

## Geschafft!

Sie werden von uns per E-Mail benachrichtigt, sobald Ihr Ergebnis in Ihrem ZAVA Patientenkonto vorliegt – in der Regel innerhalb von 5 Werktagen.